

ПРОТОКОЛ

отбора образцов клеток буккального эпителия

от «__» _____ 20__ г.

На основании определения _____ суда от «__» _____ 20__ г. в зале заседания суда был осуществлен отбор образцов клеток буккального эпителия с внутренней стороны щеки ватной палочкой у:

1. _____
(Ф.И.О. матери полностью, дата рождения)
2. _____
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)
3. _____
(Ф.И.О. отца полностью, дата рождения)

Отбор образцов осуществлялся лицами, участвующими в деле самостоятельно в присутствии:

4. _____
(должность, Ф.И.О.)
5. _____
(должность, Ф.И.О.)
6. _____
(должность, Ф.И.О.)

По статьям 307, 308 УК РФ предупреждены. Подписи:

4. _____ 5. _____ 6. _____

Судья _____ / _____

М.П.

Инструкция по отбору образцов клеток буккального эпителия

1. **Вынуть** три конверта и три зонда-тампона из общего конверта с адресом экспертного учреждения;
2. **Подписать конверты для «отбора биоматериала в 4 шага»**, печатными буквами, с указанием (в квадратике) степени родства участников по отношению друг к другу;
3. Человек, у которого будет проводиться отбор клеток слюны, должен прополоскать рот чистой кипячёной водой;
4. **Вынуть стерильный зонд-тампон из упаковки;**
5. **Потереть щеку изнутри в течении 20-40 секунд** концом палочки с валиком для соскабливания клеток;
6. **Упаковать (опустить) зонд-тампон в конверт, в соответствие с ФИО участника, не высушивая!**
7. **Заклеить конверты для «отбора биоматериала в 4 шага»!**
8. **Объединить все конверты с зондами в один общий конверт** с адресом экспертного учреждения;
9. **Отправить конверт в ООО «Медико-биологический центр».**