


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТБОРУ ОБРАЗЦОВ КЛЕТОК БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ



При возникновении вопросов по забору образцов ДНК, а также для записи в лабораторию или вызова курьера звоните:

**8 (8162) 66-76-16**

(с 8:00 до 20:00 пн-пт)

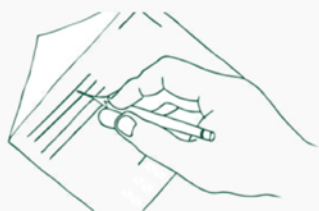

1. Подписать конверт



2. Вынуть зонд-тампон



3. Потереть щеку изнутри  
в течение 30 секунд



4. Упаковать зонд  
в конверт, и заклеить

Вынуть три конверта, три зонда-тампона и протокол из общего конверта с адресом ООО «МБЦ».

1. Подписать конверты для образцов, печатными буквами, с указанием (в квадратике) степени родства участников по отношению друг к другу;
2. Вынуть зонд-тампон из упаковки;
3. Потереть щеку изнутри в течении 30 секунд концом палочки с валиком для соскабливания клеток;
4. Упаковать (опустить) зонд-тампон, не высушивая в конверт, в соответствии с ФИО участника, и заклеить конверты для образцов!

Объединить все конверты с зондами в один общий конверт и отправить в ООО «МБЦ».

**В точности следуйте указаниям. В противном случае может потребоваться повторное взятие образцов.**